

INSTALAČNÍ PLÁN PARNÍ STERILIZÁTOR

Obchodní název: **UNISTERI HP, UNISTERI HP IL**

Typ: **SPS 636-1**

- Uvedené údaje jsou určeny k dimenzování přívodů a kapacit zdrojů jednotlivých medií. Zohledňují optimální provoz přístrojů i v nepříznivých podmínkách a variantách.



Údaje pro připojení přístroje s vlastním vyvíječem páry

A	Odpad	Teplota: max. 100 °C Přípoj proveden pomocí trubky s gumovou manžetou zasunutou do odpadu (dodáváno s přístrojem). Pozor: Připojovací místo ve stěně nesmí být výš, než je uvedeno na obrázku.	Přípoj Průtok max.	DN 50 15 l/min
E	Vývod el. kabelu	3/N/PE AC 400 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz $\pm$ 5 % Hlavní vypínač v blízkosti přístroje Přívodní vedení ukončit pětipólovou zásuvkou 3P/N/PE, 400 V/50 Hz, s jmenovitým proudem 32 A. Přístroj je vybaven pohyblivým přívodním kabelem zakončeným pětipólovou vidlicí 3P/N/PE, 400 V, 32 A. Délka přívodu je cca 3 m.	Příkon max. Jištění Spotřeba/h cca.	17,0 kW 25 A 7,0 kWh
KW	Voda pro chlazení	Teplota max. 15 °C Tvrdost 0,7 mmol/l až 2,0 mmol/l Acidita pH cca 7 Tlak 2 – 4 bar Přípoj musí být opatřen uzavíracím ventilem s vnitřním závitem G 1/2".	Přípoj Průtok max. při 2,0 bar Spotřeba cca.	DN 15 0,9 m ³ /h 0,08 m ³ /h
DW	Voda pro vyvíječ	Demineralizovaná nebo destilovaná voda Vodivost max. 15 μ S/cm Tlak 2 – 4 bar Max. hmotnost kontaminantů podle ČSN EN 285, tab. B.1. Max. 35 cm ³ rozpust.plynů / l. Přípoj musí být ukončen uzavíracím ventilem s vnitřním závitem G 3/8".	Přípoj Průtok max. při 2,0 bar Spotřeba cca.	DN 10 0,03 m ³ /h 0,007 m ³ /h
EW	Změkčená voda (Platí jen v provedení s chlazeným pláštěm)	Tvrdost $\leq$ 0,1°d Tlak 3 - 5 bar Přípoj musí být ukončen uzavíracím ventilem s vnitřním závitem G3/8"	Přípoj Průtok max. při 2,0 bar Spotřeba cca.	DN 10 0,15 m ³ /h 0,06 m ³ /h
DL	Tlakový vzduch (Platí jen v provedení IL nebo s chlazeným pláštěm)	Tlak 4 – 10 bar Max. dovolený tlak v přívodním potrubí 10 bar Přípoj ukončený ventilem a vnitřním závitem G1/4" (G1/2")	Přípoj Dimenz.vedení Spotřeba cca.	DN 8 10 Nm ³ /h 0,2 Nm ³ /h

Dodatečné údaje pro připojení přístroje na vnější rozvod páry

E	Vývod el. kabelu	3/N/PE AC 400 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz $\pm$ 5 % Hlavní vypínač v blízkosti přístroje Přívodní vedení ukončit pětipólovou zásuvkou 3P/N/PE, 400 V/50 Hz, s jmenovitým proudem 16 A. Přístroj je vybaven pohyblivým přívodním kabelem zakončeným pětipólovou vidlicí 3P/N/PE, 400V, 16 A. Délka přívodu je cca 3 m.	Příkon max. Jištění Spotřeba/h cca.	2,0 kW 16 A 0,3 kWh
FD	Pára	Sytá vodní pára Tlak 2,5 bar $\pm$ 10 % Max. dovolený tlak v přívodním potrubí 3,2 bar Max. hmotnost kontaminantů podle ČSN EN 285, tab. B.1. Přípoj ukončit uzavíracím ventilem s vnitřním závitem G1/2".	Přípoj Průtok max. Spotřeba cca.	DN 15 30 kg/h 7,0 kg/h

Údaje pro transport a pracovní místo přístroje

	Rozměry	Transportní průřez Při otáčení v chodbě	Výška Šířka Šířka	1900 mm 740 mm 1300 mm
	Hmotnost	Hmotnost transportní Hmotnost zkušební Hmotnost přístroje prázdného (komora bez vsázky)		543 kg 706 kg 520 kg
	Požadavky na podlahu	Max. zatížení podlahy v místech styku Po ustavení přístroje na pracovní místo, vysunout dosedací nohy – zajištění proti posunutí, ustavení do vodorovné roviny. Povrch podlahy pevný, tvrdý, vodě odolný, např. keramický obklad, nerezový plech apod.	AP1, AP2 AP3, AP4	po 1900 N po 1900 N
	Servisní přístup	V případě potřeby lze přístroj vysunout na kolečkách směrem dopředu (aditivum).		
	Vysálané teplo	Teplota okolí 5 – 40 °C	Celkem Čelní strana	1,9 kW 0,5 kW
	Podmínky okolí		Teplota okolí Max. relativní vlhkost Podlahy - antistatická úprava	+5 až +40 °C 85 % při 31 °C


- Platnost dle modelu a vybavení

KV_971

INSTALAČNÍ PLÁN PARNÍ STERILIZÁTOR

Obchodní název: **UNISTERI HP, UNISTERI HP IL**


Typ: **SPS 636-1 - L**

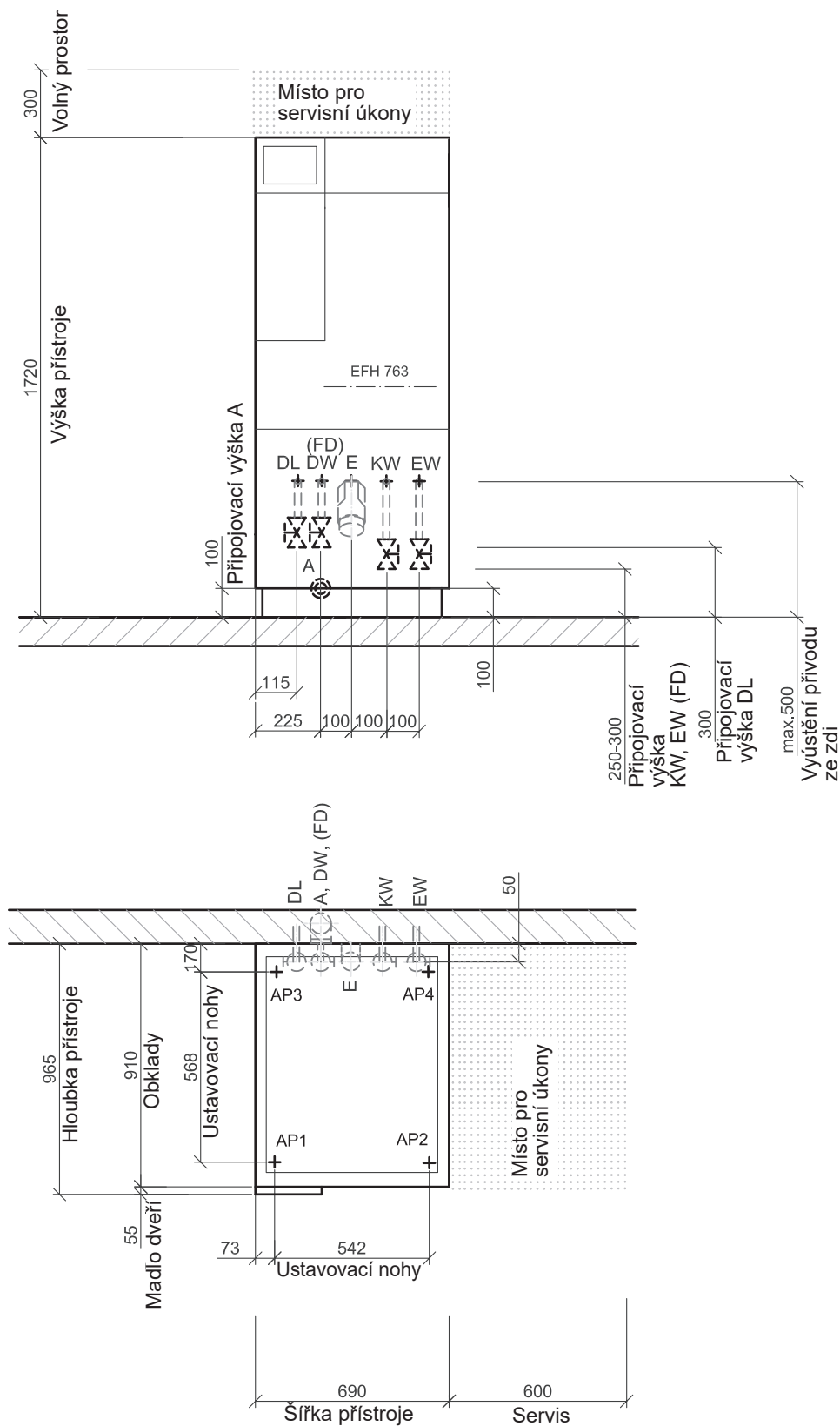

INSTALAČNÍ PLÁN PARNÍ STERILIZÁTOR

Obchodní název: **UNISTERI HP, UNISTERI HP IL**

Typ: **SPS 636-1 R**

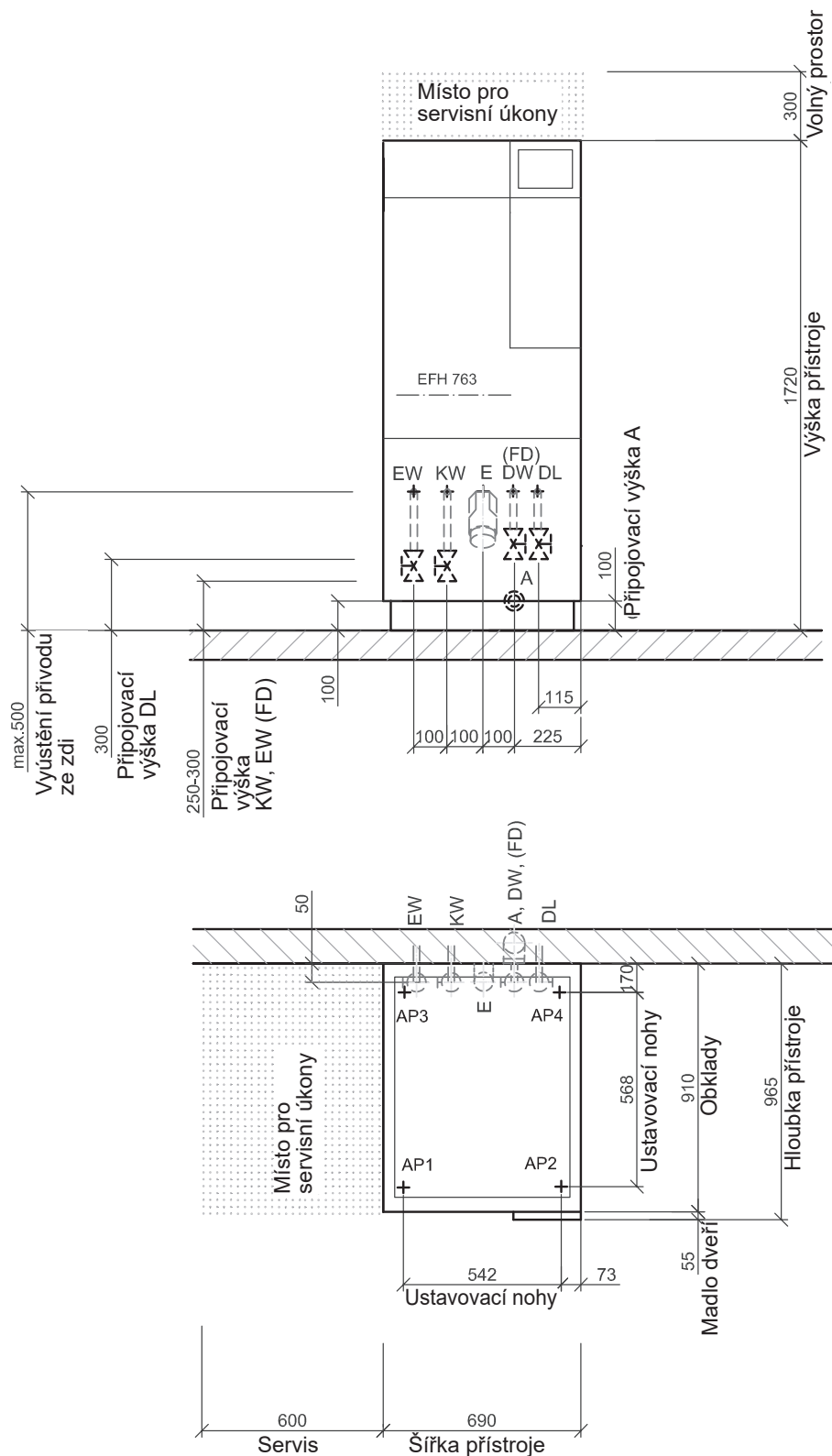

Konstrukční změny vyhrazeny.

KV_971